



CLASSIC SERIES | CORTICAL™

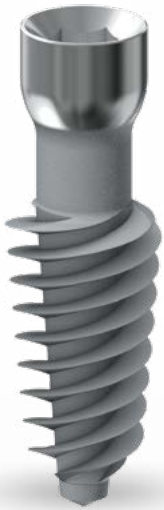

CLASSE OSSEA	Adatto per tutti i tipi di osso Consigliato per l'osso tenero.
PIATTAFORMA PROTESICA	Esagono interno
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> • Ampia area di superficie tagliente • Spire coniche e corpo interno conico • Spire ampie e taglienti
VANTAGGI	<ul style="list-style-type: none"> • Autofilettante • Elevata stabilità primaria • Fresaggio minimo • Carico immediato - eccellente per i siti postestrattivi

SPECIFICHE TECNICHE

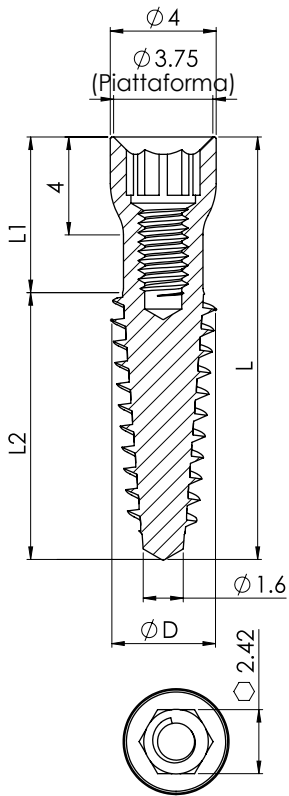

Ø D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Articolo
4.0	10	4.5	5.5	NM-M4010
	11.5	4.7	6.8	NM-M4011
	13	5	8	NM-M4013
	16	6	10	NM-M4016
	18	7	11	NM-M4018
	20	7.5	12.5	NM-M4020
5.0	8	4.1	3.9	NM-M5008
	10	4.5	5.5	NM-M5010
	11.5	4.7	6.8	NM-M5011
	13	5	8	NM-M5013
	16	6	10	NM-M5016
6.0	8	4.1	3.9	NM-M6008
	10	4.5	5.5	NM-M6010
	11.5	4.7	6.8	NM-M6011
	13	5	8	NM-M6013
	16	6	10	NM-M6016

Vite tappo inclusa con tutti gli impianti



NM-S5023




CLASSIC SERIES | CORTICAL™

PROTOCOLLO DI FRESAGGIO CONSIGLIATO CON FRESE STANDARD

Diametro fresa [mm]		Ø1.9	Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2	Ø3.65
Velocità di rotazione [RPM]		1200-1500	900-1200	800-1000	500-700	400-700
DIAMETRO IMPIANTO	Ø4.0	Osso tenero	▼	▼		
		Osso duro	▼	▼	▼	▼ 1/3
	Ø5.0	Osso tenero	▼	▼		
		Osso duro	▼	▼	▼	▼ 2/3
	Ø6.0	Osso tenero	▼	▼		
		Osso duro	▼	▼	▼	▼ 2/3

PROTOCOLLO DI FRESAGGIO CONSIGLIATO CON FRESE STEP

Diametro fresa [mm]		Ø1.9	Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2	Ø3.65
Velocità di rotazione [RPM]		1200-1500	900-1200	800-1000	500-700	400-700
DIAMETRO IMPIANTO	Ø4.0	Osso tenero	▼	▼		
		Osso duro	▼	▼	▼	▼ 2/3
	Ø5.0	Osso tenero	▼	▼		
		Osso duro	▼	▼	▼	▼
	Ø6.0	Osso tenero	▼	▼		
		Osso duro	▼	▼	▼	▼

 Fresare con fresa iniziale	 Fresare per l'intera lunghezza dell'impianto	 Fresare parzialmente secondo la lunghezza dell'impianto
--	--	---

La procedura consigliata non sostituisce in alcun modo il parere medico.
 Gli impianti possono essere sottoposti a carico immediato al raggiungimento di una buona stabilità primaria (oltre 35 Ncm) e con un carico occlusale adeguato