

RESTAURACIONES ATORNILLADAS | PROTOCOLO MULTI-UNIT

COLOCACIÓN DE UN PILAR MULTI-UNIT RECTO

1

Ajustar el pilar Multi-Unit al implante mediante el soporte de plástico.



2

Retirar el soporte.



3

Apretar el pilar con un torque de 30 Ncm, con la ayuda de un destornillador manual para sistema múltiple recto.



COLOCACIÓN DE UN PILAR MULTI-UNIT ANGULADO


1

Utilizar la guía angulada para la elección del ángulo correcto.



2

Ajustar el pilar Multi-Unit en el ángulo adecuado.

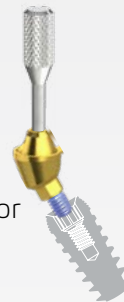

Utilizar el posicionador como indicador para el momento de atornillado final.

3

Apretar el pilar con un torque de 30 Ncm, con la ayuda de un destornillador hexagonal de 1,25 cm o de un destornillador de estrella.



4

Retirar el posicionador del Multi-Unit, desenroscándolo.



COLOCACIÓN DEL TAPÓN DE CICATRIZACIÓN

IMPRESIÓN

Eligir la técnica de impresión que desee:

Para cubeta cerrada, utilizar un transfer Snap-On.



Para la técnica de cubeta abierta, utilizar un transfer convencional.

