


SERIE CLASSIC | TUFF PRO™



TIPO DE HUESO	Todo tipo de huesos
PLATAFORMA PROTÉSICA	Hexagonal interna
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO	<ul style="list-style-type: none"> • Cambio de plataforma a 11° con la horizontal • Cuello mecanizado • Dos diseños de espiras que ayudan al autorroscado y la condensación ósea • Núcleo del cuerpo cónico • Hilos de roscas de doble paso • Ápice activo a modo de terraja con doble zona de corte
BENEFICIOS CLÍNICOS	<ul style="list-style-type: none"> • Amplio intervalo de medidas • Previene la adherencia de periopatógenos en la zona coronal del implante • Excelente estabilidad primaria para carga Inmediata • Mayor preservación del hueso alveolar crestal • Espiras autorroscantes para minimizar el traumatismo óseo • Redireccionable durante la inserción

TABLA DE MEDIDAS Y REFERENCIAS

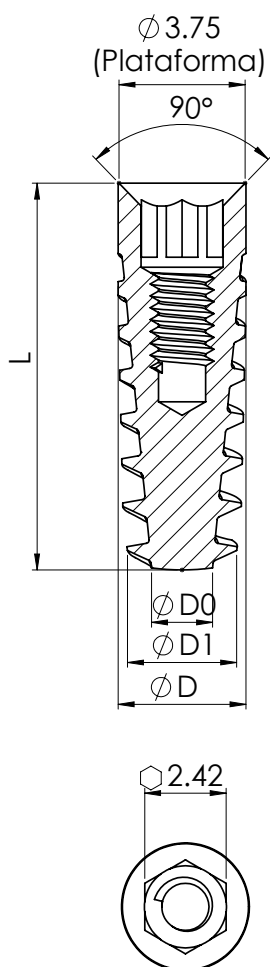

Ø D (mm)	Ø D0 (mm)	Ø D1 (mm)	L (mm)	Referencia
3.3	1.5	2.6	8	NMAF3308
			10	NMAF3310
			11.5	NMAF3311
			13	NMAF3313
			16	NMAF3316
3.75	1.8	3.1	8	NMAF3708
			10	NMAF3710
			11.5	NMAF3711
			13	NMAF3713
			16	NMAF3716
4.2	2.1	3.5	6	NMAF4206
			8	NMAF4208
			10	NMAF4210
			11.5	NMAF4211
			13	NMAF4213
5.0	2.7	4.5	16	NMAF4216
			6	NMAF5006
			8	NMAF5008
			10	NMAF5010
			11.5	NMAF5011
			13	NMAF5013
			16	NMAF5016

Tornillo de cierre incluido



NM-S5023

SERIE CLASSIC | TUFF PRO™

PROTOCOLO DE FRESADO RECOMENDADO PARA FRESAS CILÍNDRICAS

Diámetro de fresa [mm]		Ø1.9	Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2	Ø3.65	Ø4.2	Ø5.2	ØCS 5-6
Velocidad de fresado [RPM]		1200-1500	900-1200	800-1000	500-700	400-700	400-600	400-600	400-600
Diámetro de implante	Ø3.3	D3/D4	▼	▼					
		D1/D2	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
	Ø3.75	D3/D4	▼	▼	▼				
		D1/D2	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
	Ø4.2	D3/D4	▼	▼	▼	▼			
		D1/D2	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
	Ø5.0	D3/D4	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
		D1/D2	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼

PROTOCOLO DE FRESADO PARA FRESAS CON TOPE

Diámetro de fresa [mm]		Ø1.9	Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2	Ø3.65	Ø4.2	Ø5.2	ØCS 5-6
Velocidad de fresado [RPM]		1200-1500	900-1200	800-1000	500-700	400-700	400-600	400-600	400-600
Diámetro de implante	Ø3.3	D3/D4	▼	▼					
		D1/D2	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
	Ø3.75	D3/D4	▼	▼	▼				
		D1/D2	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
	Ø4.2	D3/D4	▼	▼	▼	▼			
		D1/D2	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
	Ø5.0	D3/D4	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
		D1/D2	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼

	Fresa de marcación crestal		Fresado longitudinal de la osteotomía		Fresado parcial de la osteotomía		Fresa avellanadora para la cortical crestal
--	----------------------------	--	---------------------------------------	--	----------------------------------	--	---------------------------------------------

El procedimiento propuesto solo es una recomendación, así que no debería sustituir a la elección del médico. Los implantes pueden colocarse de manera inmediata una vez conseguida una buena estabilidad primaria (superior a 35Ncm) y una carga oclusal apropiada.