


CHALLENGE SERIES | ZYGOMATIC™

SEQUENZA DI FRESAGGIO IMPIANTO **ZYGOMATIC**

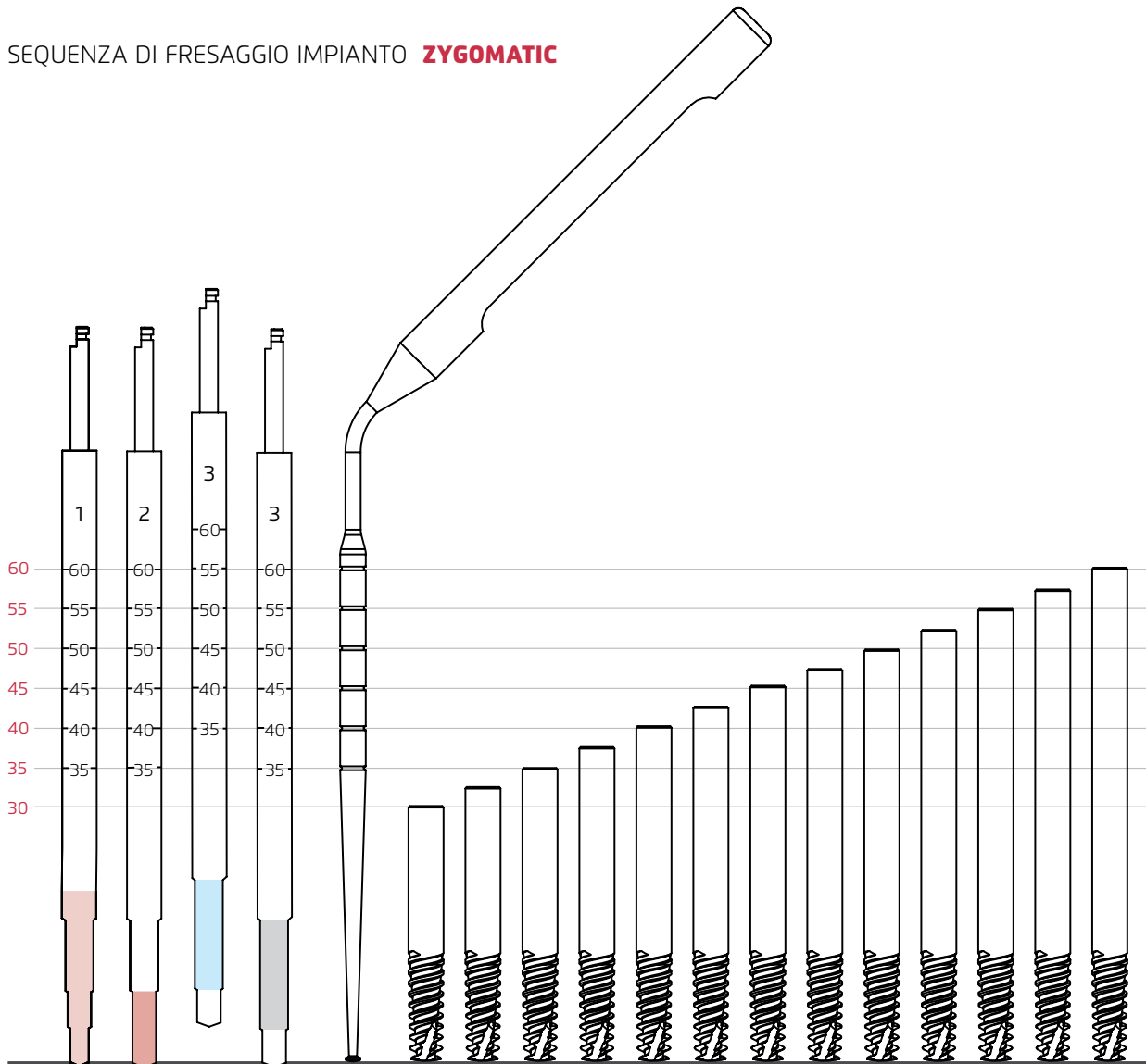

PROTOCOLLO DI FRESAGGIO CONSIGLIATO CON FRESE STEP

		Diametro fresa [mm]	1	2	3	
		Velocità di rotazione [RPM]				
		Classe ossea				
DIAMETRO IMPIANTO	Ø4.2	Osso tenero D4	↓			
		Osso tenero D3	↓	→	↓	
		Osso duro D2	↓	→	→	↓ -5mm
		Osso duro D1	↓	→	→	↓

↓	Fresare per l'intera lunghezza dell'impianto	↓ -5mm	Fresare 5 mm in meno
---	--	--------	----------------------

Prima di utilizzare impianti Zygomatic nella regione zigomatica, si consiglia di seguire un corso di formazione dedicato.