


# SERIE CHALLENGE | ZYGOMATIC™

## SECUENCIA DE FRESADO ZYGOMATIC

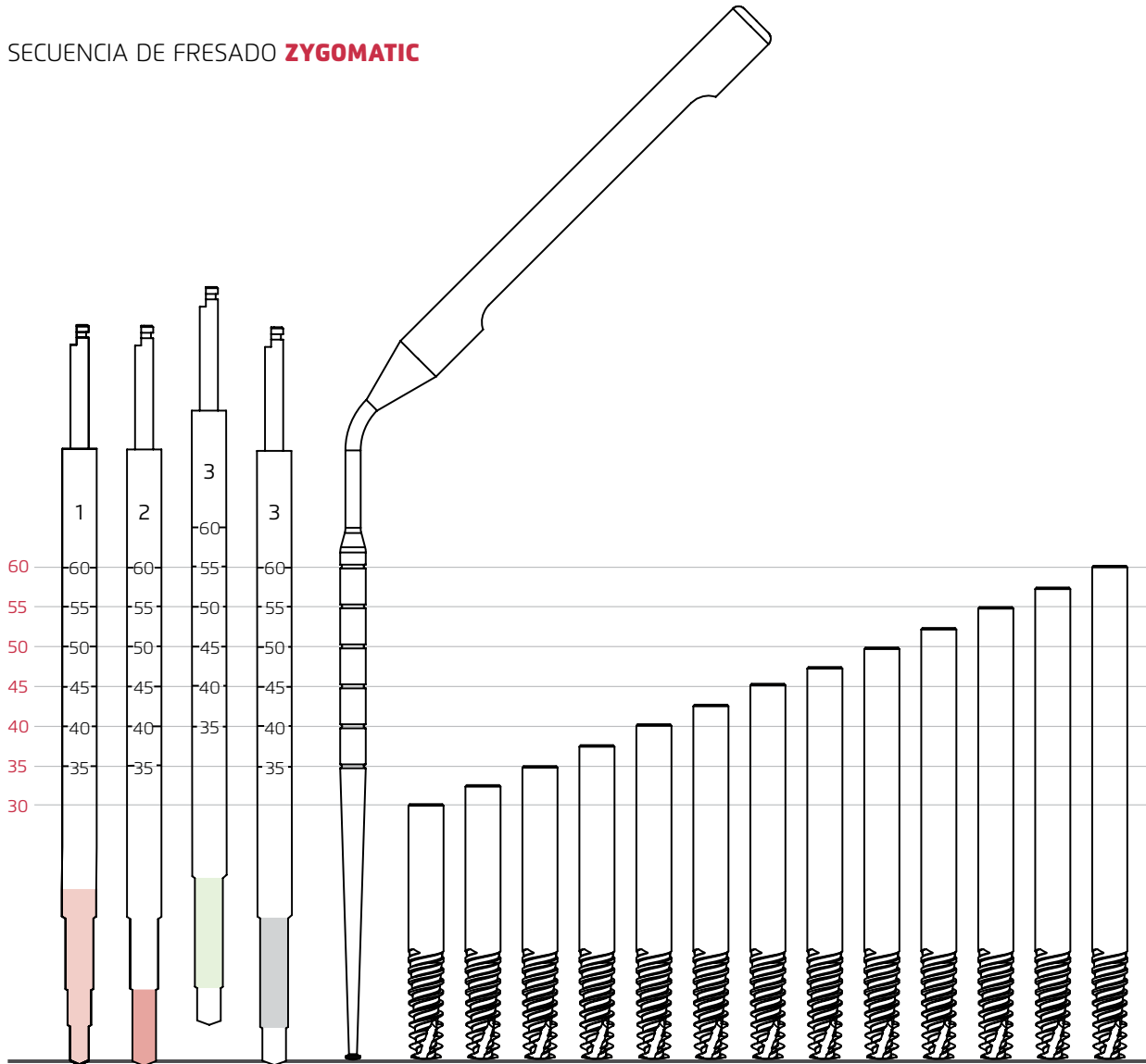

## PROTOCOLO DE FRESADO RECOMENDADO PARA FRESAS CILÍNDRICAS

		Diámetro de fresa [mm]	1	2	3
		Velocidad de fresado [RPM]			
		Tipo de hueso			
Diámetro de implante		D4	↓		
		D3	↓	↓	
	Ø4.2	D2	↓	↓	↓ -5mm
		D1	↓	↓	↓

↓ Fresado longitudinal de la osteotomía

⊖ -5mm Fresar 5mm menos

El uso de los implantes cigomáticos requiere una formación adicional sobre técnicas complementarias en implantología.